

N° DE SERIE :

FONCTIONS	ACTIONS	RESULTATS	BON	REMARQUES
OPTION Enregistreur	– Appuyer sur la touche spécifique située sur l'appareil (ou sur le bouton vert de l'électrode défi)	– Sortie papier (bande rouge = fin du rouleau de papier)	<input type="checkbox"/>	
	– Appuyer sur la même touche ou le même bouton vert	– Arrêt papier	<input type="checkbox"/>	
OPTION SpO2	– Brancher le câble SpO2 à l'appareil et le capteur SpO2 au doigt avant d'appuyer sur la touche M/A SpO2	– Au bout de quelques secondes visualisation du pléthysmogramme – Valeur SpO2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
OPTION Stimulateur	– Mettre le stimulateur en position DEMAND	– Ecran : clignotement du symbole "P" – Ecran : affichage des valeurs sélectionnées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
SI OPTION « F » (DSA) : <u>INTERDICTION DE FAIRE UN TEST SANS CABLE DE DEFIBRILLATION BRANCHE SUR RESISTANCE 50 Ω DE SIMULATION (TESTEUR OU MANNEQUIN)</u>				

Date :

Nom de l'utilisateur :

Signature :

En cas d'anomalie, contacter soit le service biomédical , soit le Commercial SCHILLER MEDICAL , soit le SAV agréé pour votre région :

Nom :

Tél. :

Important : ce document ne doit être utilisé qu'après avoir pris connaissance de la notice d'utilisation de l'appareil.